

術前準備の手引き

準備方法の説明

VisionGraft®
THE CLEAR CHOICE®

ステップ 1



ピールパックの外側は滅菌されていませんが、中に入っているガラス瓶（バイアル）と組織は滅菌されています。

ステップ 2



滅菌済みの容器（シャーレ等）を清潔エリアに置きます。


ステップ 3



ピールパックの外側は滅菌されていません

外回り看護師がピールパックを確認します。損傷や無菌状態が損なわれたとみられる場合は、使用しないでください。

ステップ 4

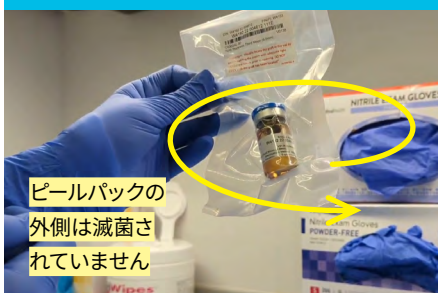

ピールパックの外側は滅菌されていません

外回り看護師は、ゆっくりと角度を変えながらピールパックを灯りにかざし、バイアルの中の組織を確認します。組織は瓶の蓋や側面に付着している場合があります。組織が確認できない場合は、他のピールパックを開けてください。未開封のものはCorneaGenに返品すれば返金を受けられます。


ステップ 5



ピールパックの外側は滅菌されていません


外回り看護師は、組織が確認できたら、（非滅菌）ピールパックを開け、（滅菌済み）バイアルを清潔エリアに出します。

ステップ 6

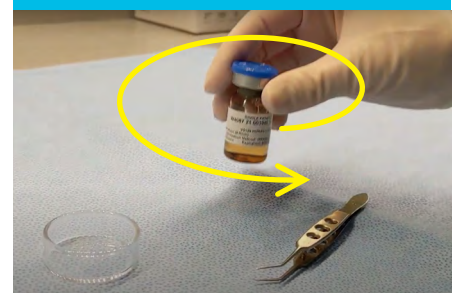

（ここから清潔操作をする）器械出し看護師は、（滅菌された）バイアルが損傷していないかを点検し、灯りにかざして、組織が入っていることを確認します。見えない場合は、バイアルをゆっくり振ってください。バイアルの蓋や側面に付着していることがあります。

ステップ 7

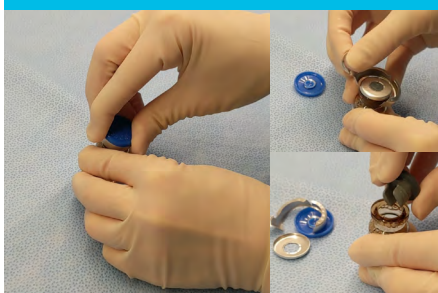


器械出し看護師は、組織が入っていることを確認した後、金属製の安全密閉バンド、引き上げ蓋、ストッパーを外します。

ステップ 8



器械出し看護師は、（滅菌済み）バイアルの中身を全て、清潔エリアに置いた滅菌済みの容器の中に出します。バイアルやその蓋はまだ捨てないでください。

ステップ 9

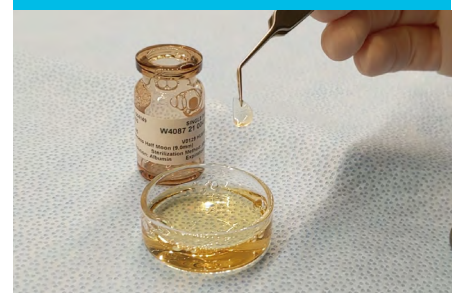

器械出し看護師は、バイアルとその蓋を捨てる前に、滅菌済みの容器に組織が入ったことを確認してください。組織を水洗いする必要はありません。これで準備は完了です。